


# Knee Scorpion™

## Pasaje y recuperación simple de la sutura por un solo portal

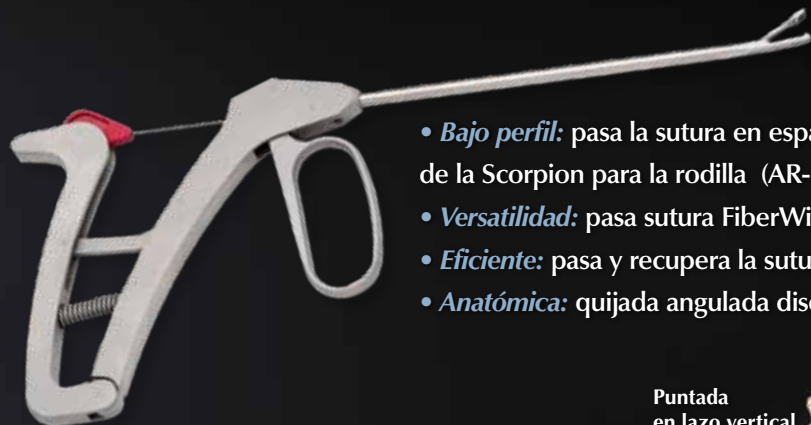


Scorpion para la rodilla  
AR-12990



- **Bajo perfil:** pasa la sutura en espacios apretados con la aguja pequeña de la Scorpion para la rodilla (AR-12990N)
- **Versatilidad:** pasa sutura FiberWire® N° 2-0 y N° 0
- **Eficiente:** pasa y recupera la sutura en un paso a través de un solo portal
- **Anatómica:** quijada angulada diseñada para la articulación de la rodilla

Puntada  
en lazo vertical

Reparación de la raíz  
del cuerno posterior

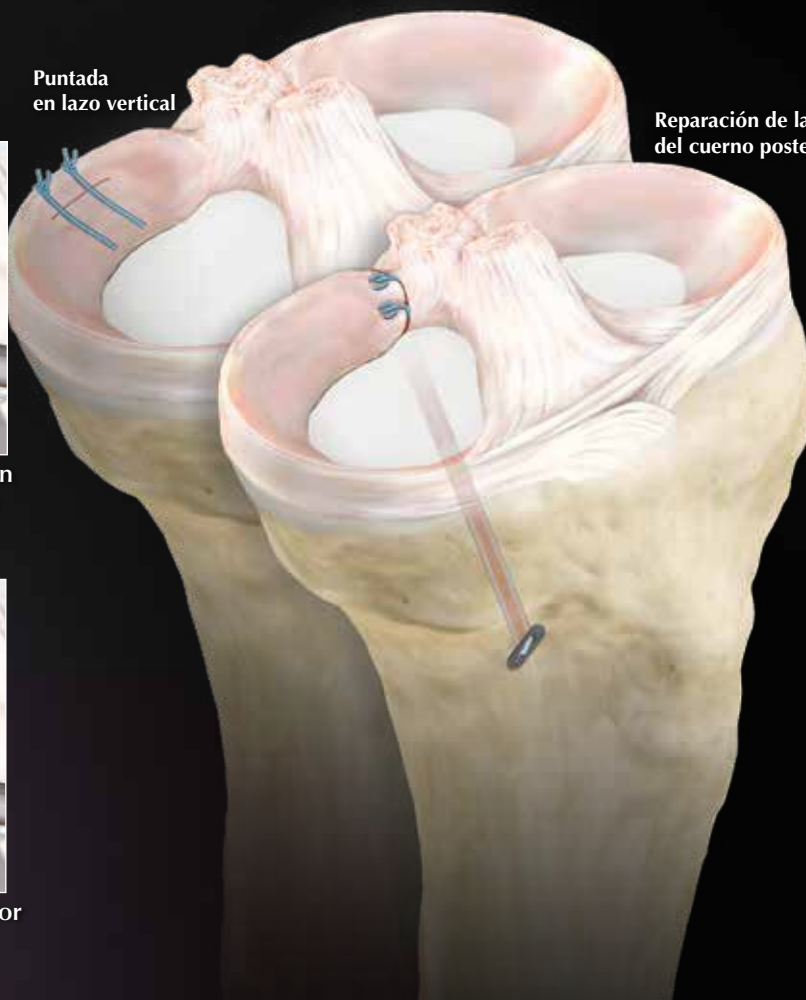

1

Cargue 1 a 2 pulgadas de FiberWire N° 2-0 o N° 0 en la quijada inferior del instrumento y posicione en la ubicación deseada.



2

Cierre la quijada superior y apriete el gatillo posterior para hacer avanzar la sutura a través del tejido.



3

Con la sutura capturada en la quijada superior, retraiga el tejido con la Scorpion. Para liberar la sutura, tire de los extremos de la sutura mientras aprieta ambos gatillos.

Arthrex®

[www.arthrex.com](http://www.arthrex.com)

...actualizaciones en tecnología  
a sólo un clic de distancia

© Arthrex Inc. 2015, Todos los derechos reservados.

LS1-00002-ES\_A