


Guía de usuario: llave de ajuste para ópticas con montura en C

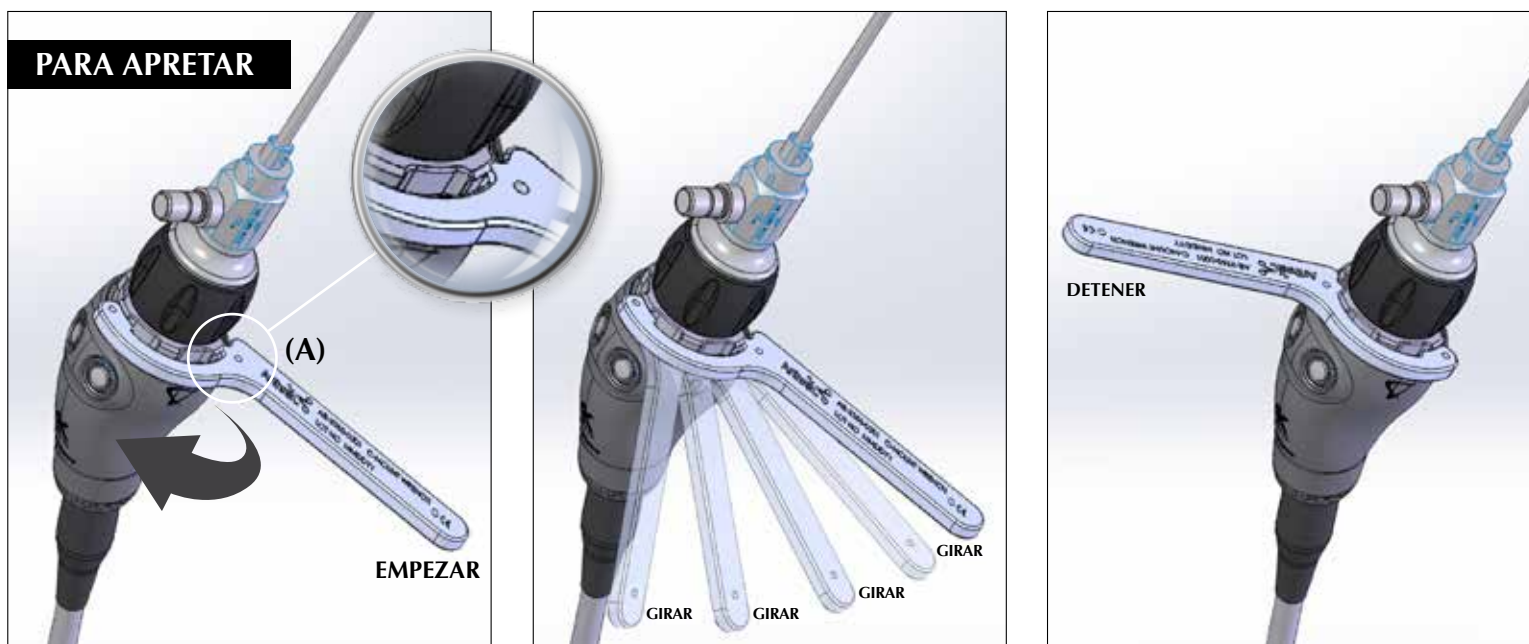

Para apretar el artroscopio en el cabezal: enrosque a mano el artroscopio en el cabezal de cámara con montura en C hasta que ajuste. Coloque la llave sobre la tuerca plateada (A) en el artroscopio mientras mantiene firmemente el cabezal de cámara, **GIRE la llave en sentido anti horario** para ajustar el artroscopio en el cabezal de cámara.



Para aflojar el artroscopio del cabezal: coloque la llave sobre la tuerca plateada (A) y gire la llave en sentido horario hasta que se afloje el artroscopio. Luego continúe desenroscando el artroscopio con la mano hasta sacarlo.

